



STOP COVID-19
NIE RYZYKUJ - ZAPOBIEGAJ

POLSKI

Producent

Przyłbica ochronna

WIELOKROTNEGO UŻYTKU



Przyłbica ochronna jest uniwersalną ochroną całej twarzy przeznaczona do wielokrotnego użytku, swoją konstrukcją zwiększa ochronę przed drobnoustrojami i innymi czynnikami zewnętrznymi minimalizując ryzyko związane z zakażeniem wirusami, a w tym COVID-19.

Idealnie sprawdza się również jako ochrona przed odruchowym dotykaniem twarzy zanieczyszczonymi dłońmi.

Funkcjonalność:

- uniwersalny rozmiar
- opaska dopasowująca się do kształtu głowy
- możliwość wielokrotnego użytku
- lekka i wytrzymała konstrukcja
- bardzo wygodna przy użytkowaniu
- ergonomiczny kształt
- szybki i łatwy montaż
- odporna na środki dezynfekujące na bazie alkoholu
- dostępne duże ilości - krótki czas realizacji
- wymiary: szer. dolna 190mm, wys. 280mm



Dostępne kolory:



Szary



Żółty



Niebieski

* Inne kolory dostępne na zamówienie



ROZTOCZE
www.roztocze.eu

ROZTOCZE ZUP Sp. z o. o.


ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. +48 84 664 35 02
rst@roztocze.eu www.roztocze.eu




INSTRUKCJA MONTAŻU




Przed przystąpieniem do montażu przyłbicy należy dokładnie umyć i zdezynfekować dłonie oraz elementy składowe przyłbicy.

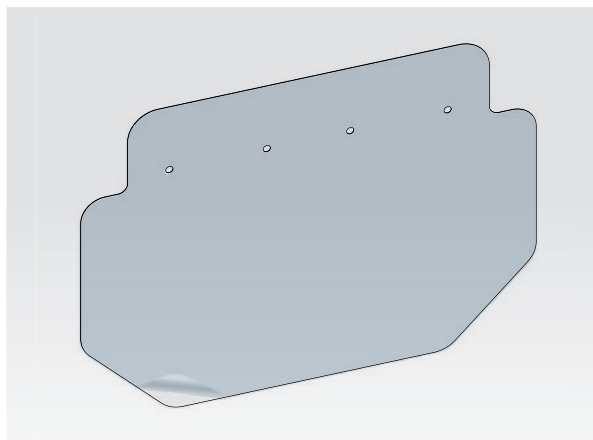


1. Odkleić folię zabezpieczającą z osłony (folia znajduje się **po obu stronach osłony**)

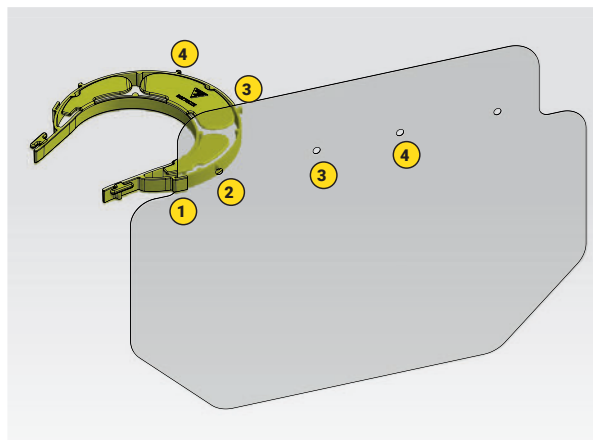

2. Wsunąć koniec osłony w zaczep **1** wcisnąć otwory osłony w zaczepy opaski czołowej **2, 3, 4**

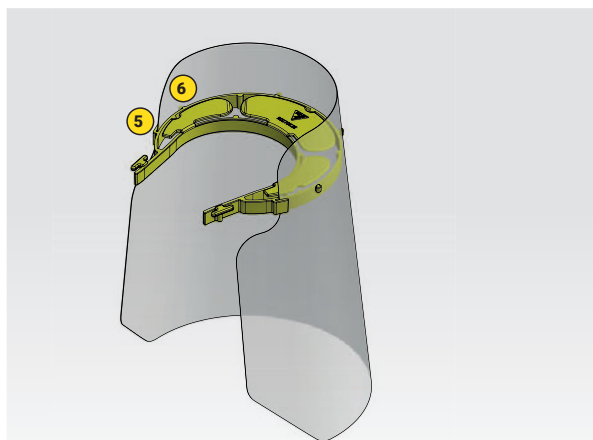

3. Przed wciśnięciem otworu w zaczep **6** wsunąć drugi koniec szyby w zaczep **5**

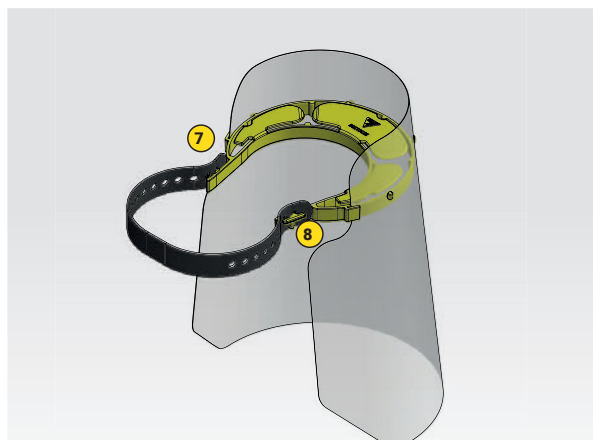

4. Na zaczepach **7 i 8** zamontować regulowany pasek elastyczny

- Na tarczy przyłbicy **znajduje się folia ochronna**
- Folię po wewnętrznej stronie należy odkleić przed montażem
- Folię ochronną po stronie zewnętrznej można odkleić po montażu
- Za pomocą otworów w opasce dopasować rozmiar przyłbicy do obwodu głowy
- Materiały przyłbicy pozwalają na jej dezynfekowanie za pomocą środków na bazie alkoholu
- Należy unikać używania wysokiej temperatury ze względu na możliwe odkształcenia
- Do dezynfekcji **należy używać miękkich materiałów**, które nie zarysują powierzchni przyłbicy

NR KATALOGOWY	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
4.551.001	Osłona	PET A
	Opaska czołowa	Polipropylen
	Regulowany pasek elastyczny	Elastomer

Produkt ten nie stanowi środka ochrony osobistej w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej PPER 2016/425/UE. Treść rozporządzenia dostępna na stronie www.gov.pl



ROZTOCZE
www.roztocze.eu

ROZTOCZE ZUP Sp. z o. o.

ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. +48 84 664 35 02
rst@roztocze.eu www.roztocze.eu

