



STOP COVID-19
NIE RYZYKUJ - ZAPOBIEGAJ

POLSKI

Producent

PÓŁPRZYŁBICA OCHRONNA

WIELOKROTNEGO UŻYTKU



Półprzyłbica ochronna jest uniwersalną ochroną nosa i ust przeznaczoną do wielokrotnego użytku, swoją konstrukcją zwiększa ochronę przed drobnoustrojami i innymi czynnikami zewnętrznymi minimalizując ryzyko związane z zakażeniem wirusami, a w tym COVID-19.

Idealnie sprawdza się również jako ochrona przed odruchowym dotykiem twarzy zanieczyszczonymi dłońmi.

Funkcjonalność:

- uniwersalny rozmiar
- wygodne i szybkie zakładanie dzięki podporze na brodę oraz dwóm gumkom zakładanym na uszy
- możliwość wielokrotnego użytku
- lekka i wytrzymała konstrukcja
- wygodna przy użytkowaniu
- nie utrudnia oddychania
- nie przeszkadza w noszeniu okularów i nie powoduje ich parowania
- szybki i łatwy montaż
- odporna na środki dezynfekujące na bazie alkoholu
- wymiary: szer. 142 mm, wys. 84 mm

Dostępne kolory:



Biały



Żółty



Czarny

* Inne kolory dostępne na zamówienie



ROZTOCZE
www.roztocze.eu

ROZTOCZE ZUP Sp. z o. o.


ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, Poland
tel. +48 84 664 35 02, rst@roztocze.eu www.roztocze.eu




INSTRUKCJA MONTAŻU




Przed przystąpieniem do montażu półprzyłbicy należy dokładnie umyć i zdezynfekować dłonie oraz elementy składowe półprzyłbicy.

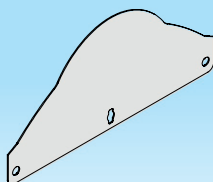


- ❶ Odkleić folię zabezpieczającą z osłony (folia znajduje się **po obu stronach osłony**)

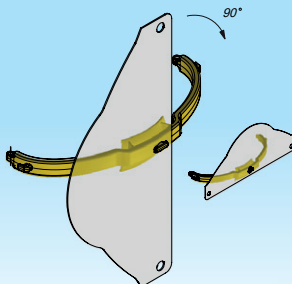

- ❷ Wsunąć otwór osłony na zaczep znajdujący się na środku ramki osłony i obrócić osłonę o 90 stopni.

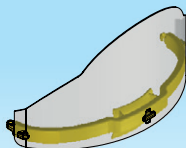

- ❸ Zamocować osłonę na dwóch skrajnych zaczepach

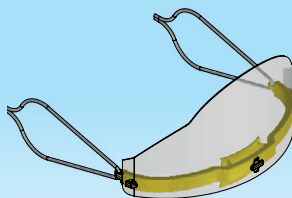

- ❹ Zamocować paski elastyczne w uchwytach na końcach ramki

- Na tarczy półprzyłbicy **znajduje się folia ochronna**
- Folię po wewnętrznej stronie należy odkleić przed montażem
- Folię ochronną po stronie zewnętrznej można odkleić po montażu
- Materiały półprzyłbicy pozwalają na jej dezynfekowanie za pomocą środków na bazie alkoholu
- Należy unikać używania wysokiej temperatury ze względu na możliwe odkształcenia
- Do dezynfekcji **należy używać miękkich materiałów**, które nie zarysują powierzchni półprzyłbicy

NR KATALOGOWY	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
4.551.002	Oslona	PET A
	Ramka osłony	Polipropylen
	Pasek elastyczny	Poliester + guma

Produkt ten nie stanowi środka ochrony osobistej w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej PPER 2016/425/UE. Treść rozporządzenia dostępna na stronie www.gov.pl



ROZTOCZE
www.roztocze.eu

ROZTOCZE ZUP Sp. z o. o.

ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, Poland
tel. +48 84 664 35 02, rst@roztocze.eu www.roztocze.eu

